

# Rolator pliabil cu 4 roti

## Manual de utilizare



Distribuitor: SC RED ORTOPEDIC MED SRL

Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 128

Telefon: 0762 605 971



Rolatorul ofera ajutor si siguranta persoanelor in varsta sau cu dizabilitati motorii, nu trebuie ridicat in timpul mersului, ceea ce usureaza utilizarea rolatorului.

Rolatorul ortopedic cu 4 roti este indicat persoanelor cu mobilitate scazuta sau care sufera de handicap locomotor temporar ori permanent. Oferă stabilitate si siguranta in utilizare.

Utilizare:

- Pentru depozitare, rolatorul se pliaza si cosul poate fi detasat.

Vezi fig. 1.



**fig. 1**

- Pentru a pune frana, se trage de cele 2 manete, iar pentru a infrana rolatorul in timpul stationarii, manetele se imping in jos pana se simte un click. De asemenea, eficienta franelor poate fi reglata prin sistemul tip bicicleta de la baza rotilor. Vezi fig. 2.



**fig. 2**

- Pentru deplasari pe distante mai lungi, datorita scaunelului cu care este prevazut, ii permite utilizatorului sa se aseze pentru un moment de odihna. De asemenea, sezutul poate fi rabatat. Vezi fig. 3.



**fig. 3**

Date tehnice:

- Latime totala: 59cm
- Latime sezut: 34cm
- Inaltime totala: 81-92cm
- Adancime totala: 64cm
- Adancime sezut: 34cm
- Greutatea maxima a utilizatorului: 110kg
- Greutatea rolatorului: 7kg
- Diametrul rotilor: 15cm